

## 輸血検査に正確でスピーディな操作性を発揮！



- 遠心時間は0～2分の間で自由に可変設定ができるため、固定式回転数との併用で検査の精度はアップしています。
- オートバランス機構採用で、安定した回転性能を得ることができます。
- タイマーを一度セットすれば、“START”ボタンを押すだけで始動します。
- “BRAKE”ボタンを押すと、10秒以内にロータヘッドが停止します。
- 遠心終了後にブザーがなり、終了をお知らせします。
- ロータはクームス試験の血球洗浄の際に試験管を装着して逆さにしたまま、生理食塩水が捨てられる設計となっております。
- ケーシングはサビ・腐食に強いSUS304を使用しています。
- 通常操作に使用するツマミ類は正面に集中しています。
- 遠心の様子が見えるよう、蓋を透明に設計しています。
- ロータは1～12の数字を封印し、また対称位置を色分けしていますので検体が少ない場合でもセットが容易にできます。

**本体価格(ロータ付)：¥240,000**

## ロータ

検体数	1～12検体
適応試験管	直径 10～12mm 長さ 75～80mm
重量	350g

## 本体仕様

最高回転数	HIGH, LOWの切り換えによる回転数固定型 LOW: 1, 500[rpm] HIGH: 3, 400[rpm]
最大遠心力	LOW: 201[×g] HIGH: 1, 035[×g]
処理容量	φ 10×80[mm] φ 12×75[mm]
タイマー	タイマーツマミによる半固定型タイマー 設定範囲 0～1分: 15秒間隔の目盛り付 1～2分: 30秒間隔の目盛り付 HOLD: 連続運転
電源	AC100[V] 3[A]
寸法	W240×D255×H293[mm]
重量	9[kg]



※掲載価格は税別です。



株式会社 **コクサン**

http://www.kokusan.co.jp  
E-mail: info@kokusan.co.jp

- 東京営業所 〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16  
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
- 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)  
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
- 九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号室)  
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
- 北海道出張所 〒065-0032 札幌市東区北32条東1-6-2(エクシード'32 102号)  
TEL(090)3392-2205(直) FAX(011)743-3666

※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

Copyright ©2015 Kokusan Corporation, All Rights Reserved.

③20150710SN